


**Attach front cross bar to secure frame (as-  
sure both pins click completely into holes)**  
Sujete la barra para asegurar el marco  
(asegurese de que ambas clavijas entren com-

pletamente en los agujeros)

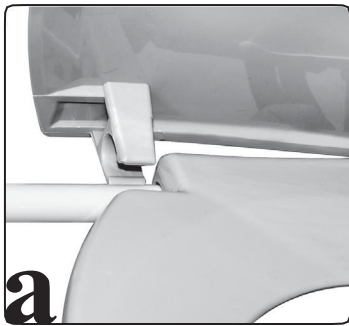

**Snap on seat and lid**

Inserte a presión el asiento y la tapa



**Attach legs to frame using detent buttons. Adjust each leg equal height**

Sujete las patas al marco usando los pines. Ajustelas a una altura equivalente



**Attach U-bar to rear (2 pins)**

Adjunte la barra en "u" atras (2 pines)

**Use bucket for bedside or splash guard for over the toilet**



**Push pins to release U-bar and remove bucket**


Empuje los pines para liberar la bar-

ra en "u" y retfrela



**Push pins to release front cross bar and fold it down**

Empuje los pines para liberar la barra cruzada y retfrela

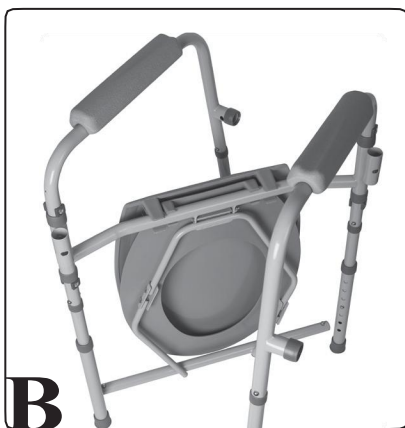

**Fold commode as shown**

Doble el inodoro asegurandose de que la silla y la tapa no queden atrapadas en el marco



**Legs can be set to lowest setting or removed to make more compact**

Las patas se pueden colocar en la posición mas baja o retirar para hacer-

lo mas compacto